

TUBOS EXTENSORES DE ALTA PRESSÃO - 1200 PSI (HEMODINÂMICA)

MODELOS:

EXAP25/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 25 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP51/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 51 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP55/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 55 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP76/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 76 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP80/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 80 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP120/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 120 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP130/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 130 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP180/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 180 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).
EXAP240/AP1200H - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO 240 CM 1200 PSI (HEMODINÂMICA).

PREPARAÇÃO PARA USO:

1. Empregar técnica asséptica durante a remoção da embalagem e durante o emprego do produto.
2. Em campo estéril, unir a extremidade com conexão fêmea da linha de injeção ao acessório injetor de fluidos (ex.: seringa) e, posteriormente, completar o lúmen interno da linha de injeção com o fluido desejado, para a completa e total retirada do ar.
3. Acoplar a conexão macho ao produto desejado (ex. cateter angiográfico).
4. Cuidar para que se evite a presença de bolhas, tanto no acessório injetor quanto na linha de injeção.
5. Iniciar o procedimento desejado
6. Não exceder a injeção de fluidos com pressão superior ao recomendado aos modelos para até 1.200PSI.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS:

Precauções, restrições, advertências ou cuidados:

- Antes do uso do produto, conferir atentamente se o modelo do mesmo é adequado e está de acordo para a aplicação e o procedimento pré estabelecido, obedecendo sempre a sua indicação e instruções de uso.
- Não realizar a injeção de meios de contraste ou fluidos com pressão superior ao recomendado e indicado nas instruções de uso do modelo do produto.
- A empresa não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria do produto. O usuário é o único responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado pelas instruções e rotulagem do produto.
- Produto de uso único. Não reesterilizar. Não reutilizar.
- O produto deve ser manuseado somente por pessoal qualificado e habilitado.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, ou após a data do seu vencimento.
- Antes do uso, inspecionar a extensão da linha de injeção e sua embalagem a fim de verificar possíveis danos causados no produto resultantes de manuseio inadequado durante o armazenamento e transporte do produto.
- Observar a não presença de bolhas no sistema sempre que se pretender administrar fluidos no paciente.
- Verificar cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o seu prazo de validade. As condições de esterilidade estarão asseguradas, dentro do seu prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada.
- Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou desconexões. Observar os ajustes das conexões de montagem do produto.
- Em caso de dúvidas, comunicar imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.
- Descartar após o uso. Não reutilize ou reesterilize.